



Guck mal, wer da spricht! Ist es eine Provox Vega?
Erkennungsmerkmale an Provox® Stimmprothesen

Atos
Atos Medical Your voice

Provox® Vega™



Beschriftung


Durchmesser und Größe

Ventilklappe transparent
(Silikon), schräg, innen-
liegend

Ventilgehäuse blau

Ansatz Sicherheitsfaden
senkrecht zum Flansch

Trachealer Flansch oval

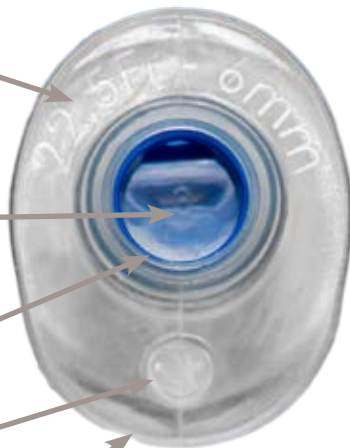

Provox Vega

Unsere Beste:

- Leichteres Sprechen
- Längere Liegedauer*
- Gebrauchsfertige
Einführungshilfe - schneller,
sicherer Einsatz

Trägt Ihr Patient noch
das Vorgängermodell?

Achten Sie auf die hier
aufgeführten Merkmale!

**Are modern voice prostheses better? A lifetime comparison of 749 voice prostheses" P. Kress, P. Schäfer, F. P. Schwerdtfeger, S. Rösler (www.stimmprothese.com)

Provox® Vega™ XtraSeal™



Beschriftung


Durchmesser und Größe

Ventilklappe transparent
(Silikon), schräg, innen-
liegend

Ansatz Sicherheitsfaden
senkrecht zum Flansch

Ventilgehäuse blau

Trachealer Flansch oval

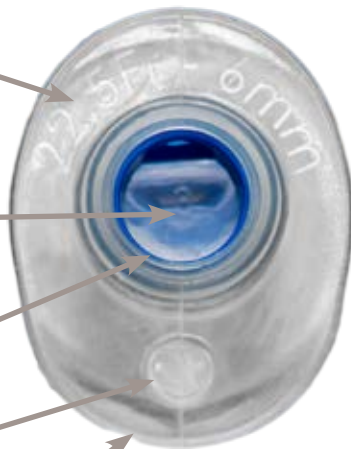

Provox Vega XtraSeal

Auch als Problemlöser
bei periprothetischen
Leckagen.

Unsere Beste:

- Leichteres Sprechen
- Längere Liegedauer*
- Gebrauchsfertige
Einführhilfe - schneller,
sicherer Einsatz

Zur Abdichtung von
periprothetischen
Leckagen mit den
Vorzügen der
Provox Vega

**Are modern voice prostheses better? A lifetime comparison of 749 voice prostheses" P. Kress, P. Schäfer, F. P. Schwedtfeger, S. Rösler (www.stimmprothese.com)

Provox® ActiValve®




Ventilklappe blau
(Kunststoff), flach

Trachealer Flansch rund

Ventilgehäuse blau

Ansatz Sicherheitsfaden
in Ebene des Flansches,
rund

Beschriftung Größe

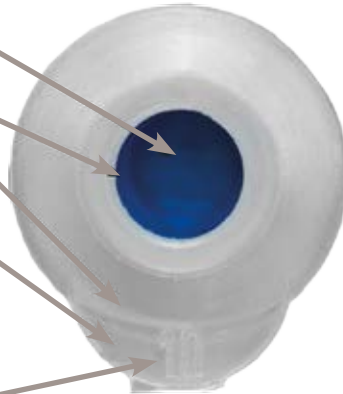

Provox ActiValve

Unser Problemlöser:
Einsatz bei häufig auf
tretender, frühzeitiger
Undichtigkeit durch

- übermäßigen
Candidabefall
- negativen Druck im
Pharynx/Ösophagus
während des Schluckens
oder Einatmens

Provox®2

Ventilklappe transparent
(Silikon), flach

Ventilgehäuse blau

Trachealer Flansch rund

Ansatz Sicherheitsfaden
in Ebene des Flansches,
eckig

Beschriftung Größe



Optische Unterscheidungsmerkmale zu Provox Vega:

- Beschriftungsposition
- Flanschform
- Ansatz Sicherheitsfaden
- Lage Ventilklappe



Provox®1



Optische Unterscheidungsmerkmale zu Provox Vega:

- Beschriftungsposition
- Flanschform
- Ansatz Sicherheitsfaden
- Lage Ventilklappe


Keine Beschriftung

Ventilgehäuse transparent (Silikon), flach

Ventilgehäuse blau

Trachealer Flansch eiförmig

Ansatz Sicherheitsfaden senkrecht zum Flansch

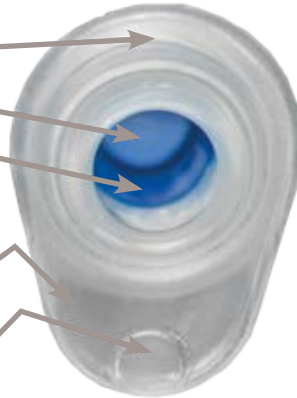

Erkennungsmerkmale auf einen Blick

Merkmale	Provox® Vega™ XtraSeal™	Provox® Vega™	Provox® ActiValve®	Provox®2	Provox® (1)
Art	Spezialprothese	Standardprothese	Spezialprothese	Standardprothese	Standardprothese
Beschriftung	Durchmesser und Größe (im oberen Bereich des Flansches)	Durchmesser und Größe (im oberen Bereich des Flansches)	Größe (am Ansatz Sicherheitsfaden)	Größe (am Ansatz Sicherheitsfaden)	Keine
Ventilklappe	Transparent (Silikon), schräg, innenliegend	Transparent (Silikon), schräg, innenliegend	Blau (Kunststoff), flach	Transparent (Silikon), flach	Transparent (Silikon), flach
Ventilgehäuse	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Trachealer Flansch	Oval	Oval	Rund, mit Ansatz Sicherheitsfaden	Rund, mit Ansatz Sicherheitsfaden	Eiförmig
Ansatz Sicherheitsfaden	Senkrecht zum Flansch	Senkrecht zum Flansch	In Ebene des Flansches, rund	In Ebene des Flansches, eckig	Senkrecht zum Flansch
Erhältliche Größen/ Längen	4; 6; 8; 10; 12,5; 15	4; 6; 8; 10; 12,5; 15	4,5; 6; 8; 10; 12,5	4,5; 6; 8; 10; 12,5; 15	4,5; 6; 8; 10; 12,5; 15

Zubehör zu Provox® Vega™ Stimmprothesen



Provox® Vega™ with Insertion System



Provox® XtraFlange™



Provox® Measure



Provox® Dilator



Provox® Flush



Provox® Brush



Provox® Vega™ Plug

Unsere Produktbroschüren zum Download



Provox® Produktkatalog



Hilfsmittelkatalog



Provox® Vega™ Punktionsset



Provox® Vega™ XtraSeal





Atos Medical hat ein großes Ziel:
Wir wollen tracheotomierten und
laryngektomierten Menschen wieder
eine Stimme geben! Jahrzehntelange
Erfahrung und ein tiefes Verständnis
für die Bedürfnisse unserer Kunden
bilden die Grundlage für die
Entwicklung unserer Designlösungen
und Technologien.

Atos Medical GmbH
Mülheimer Str. 3-7
D-53840 Troisdorf
T. +49 (0)800 53 53 667
F. +49 (0) 2241 14 93 74
@ info.de@atosmedical.com
www.atosmedical.de